

DANSK VEJLEDNING

ADVARSLER

INDIKATIONER: TIL IKKE-KIRURGISK ELLER POST-OPERATIV STØTTE OG IMMOBILISERING AF DEN SKADEDE SKULDER, NÅR GLENOHUMERAL POSITIONERING ER PÅKRÆVET.

FORSIGTIG: ANORDNINGEN ER IKKE BEREGET TIL GENANVENDELSE AF EN ANDEN PATIENT ELLER LÆNGEREVARENDE BRUG, DER OVERSTIGER 180 DAGE.

FORSIGTIG: AKTIVITETSÆNDRING OG KORREKT REHABILITERING ER EN VIGTIG DEL AF ET SIKKERT BEHANDLINGSPROGRAM. HVIS DER OPSTÅR YDERLIGERE SMERTER ELLER ANDRE SYMPTOMER UNDER BRUG AF DENNE ANORDNING, SKAL DU AFBRYDE BRUGEN OG SØGE LÆGE.

FORSIGTIG: DENNE ANORDNING ER IKKE BEREGET TIL AT FORHINDRE PERSONSKADE ELLER TIL AT REDUCERE ELLER ELIMINERE RISIKOEN FOR GENTAGEN PERSONSKADE.

FORSIGTIG: DENNE ANORDNING ER UDVIKLET TIL DE INDIKATIONER, DER ER ANGIVET OVENFOR, OG KAN BLIVE BESKADIGET AF USÆDVANLIGE AKTIVITETER SOM F.EKS. SPORT, FALD ELLER ANDRE ULYKKER. FOR AT UNDGÅ RISIKOEN FOR UHELD OG MULIG PERSONSKADE PÅ PATIENTEN SKAL BRUGEN AFBRYDES, HVIS EN SÅDAN HÆNDELSE HAR FUNDET STED.

FORSIGTIG: EFTERLAD IKKE DENNE ANORDNING I EN BIL PÅ EN VARM DAG ELLER PÅ ET ANDET STED, HVOR TEMPERATUREN KAN OVERSTIGE 65 °C (150 °F) I LÆNGERE TID.

SÅDAN FJERNES ARC 2.0 MED PUDE

Eksempel: Højre skulder

A. Løsn spændet på skulderremmen, og lad det glide af bagsiden af skulderen. Hvis underarmsremmen benyttes, skal spændet løsnes, hvilket efterlader det fastgjort til den indvendige ring på nakkepuden.

B. Løsn spændet på pudens torsorem, og lad det falde ned bag ryggen. Efterlad puden fastgjort til armslyngen.

C. Fjern slyngen og puden som én enhed fra den berørte arm. Efterlad slyngen og puden fastgjort til hinanden med henblik på senere genpåføring.

SÅDAN PÅFØRES ARC 2.0 MED PUDE IGEN

Eksempel: Højre skulder










D. Før den berørte arm ind i armslyngen. Armslyngen og puden skal stadig være fastgjort til hinanden.

E. Ræk ud bag ryggen med den raske arm, træk pudens torsorem rundt til forsiden, og fastgør spændet på forsiden.

F. Ræk ud bag ryggen med den raske arm, træk skulderremmen rundt til forsiden, og fastgør spændet til håndledsstøtteremmen på armslyngen.

SÅDAN PÅFØRES ARC 2.0 MED PUDE IGEN MED UNDERARMSREMME FASTGJORT

G. Før den raske arm gennem skulderremmen og den resterende rem. Indsæt det resterende spænde i underarmsremmen for at fastgøre det.

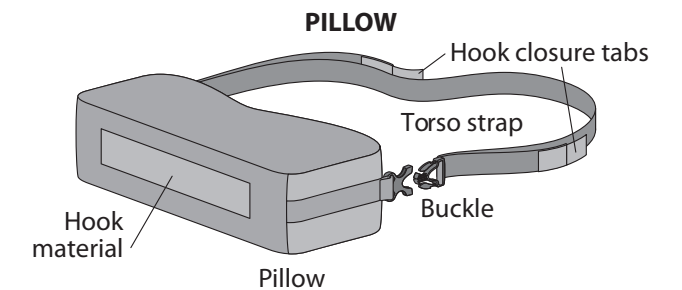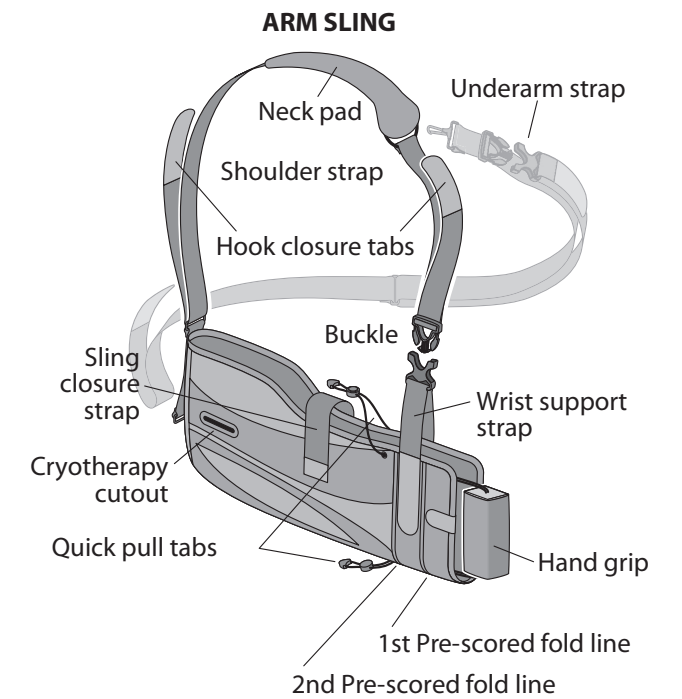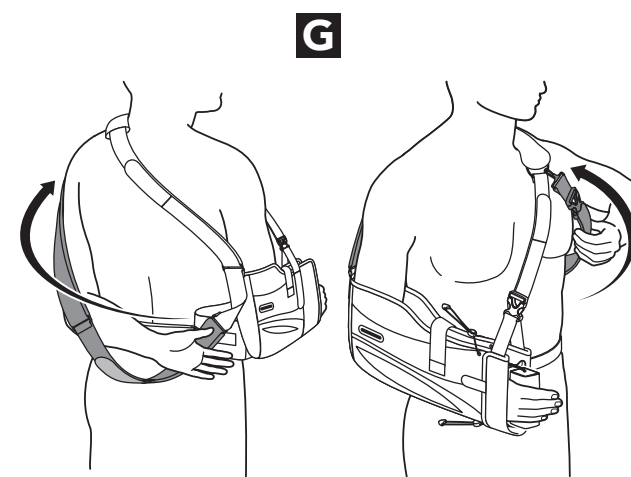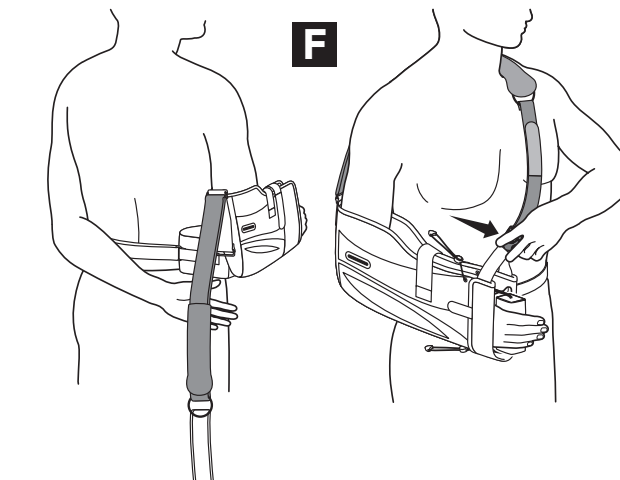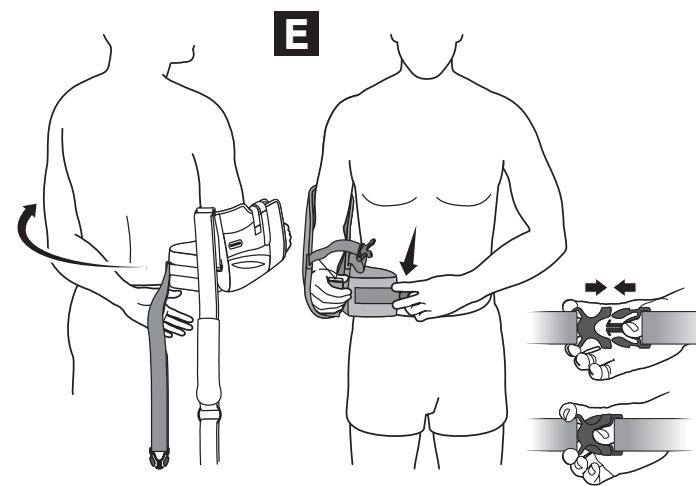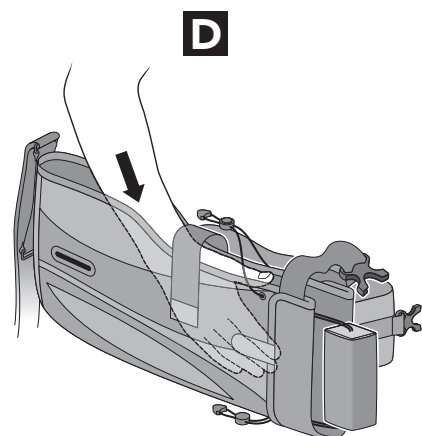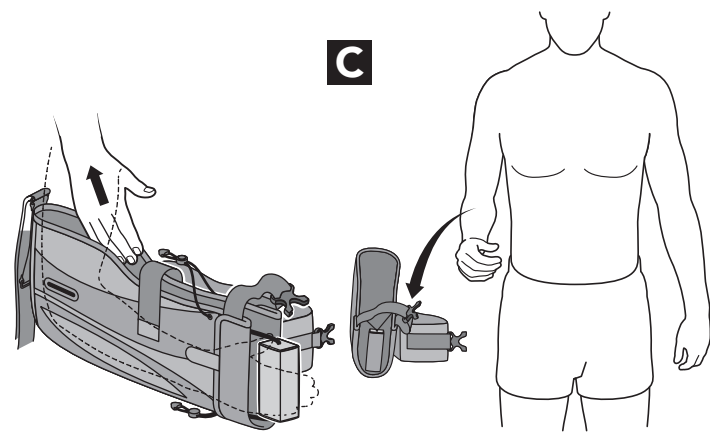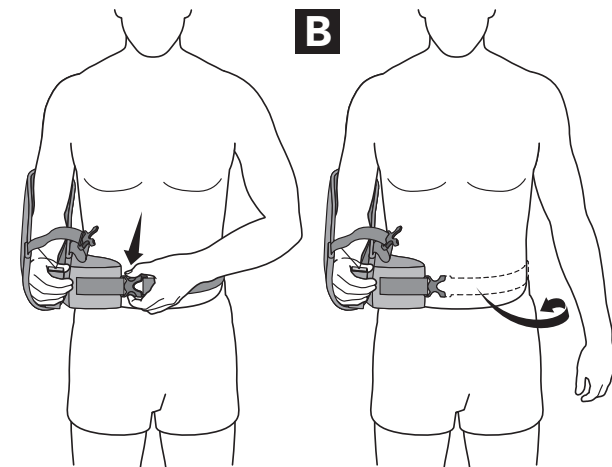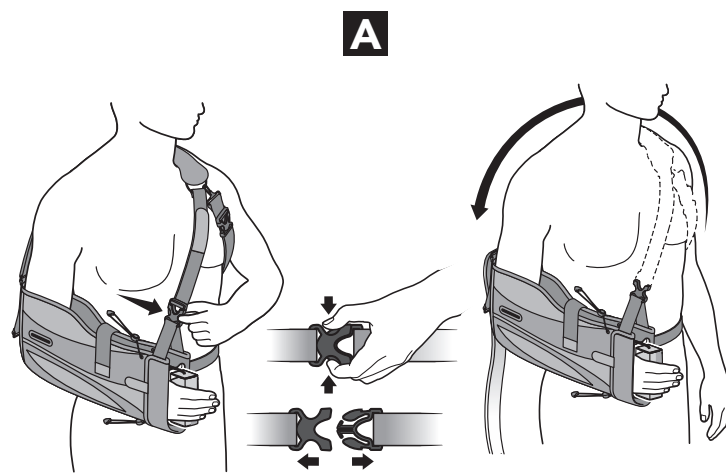

ARC® 2.0 Patient with Pillow

FITTING INSTRUCTIONS

DANISH
FINNISH
NORWEGIAN
ROMANIAN
POLISH



Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 U.S.A.
P: 800-321-0607
F: 800-329-2734

www.breg.com

©2020 Breg, Inc. All rights reserved.
Arc is a registered trademark of Breg.

AW-1.04016 Rev A 11/20



E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

Hvis der er indtruffet alvorlige hændelser i forbindelse med anordningen, skal dette rapporteres til Breg og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

